

**Notice des fauteuils roulants PANTHERA**



## Notice des fauteuils roulants PANTHERA

### 1. Domaine d'utilisation

Votre fauteuil roulant PANTHERA est destiné à une utilisation normale de fauteuil roulant à propulsion manuelle. Il est destiné à transporter une seule personne dans un environnement adapté.

### 2. Vérification

A réception de votre fauteuil roulant PANTHERA, vérifiez les points suivants :

- dimensions : elles doivent correspondre à votre commande
  - roues arrière : le système de démontage rapide doit fonctionner aisément et verrouiller automatiquement lorsqu'on met chacune des roues en place
  - fourches : elles doivent tourner librement sur leurs axes
  - dossier : il doit se plier facilement
  - freins : ils doivent bloquer efficacement votre roulant sans être trop durs à manipuler
- En cas de doute, contactez votre revendeur.

### 3. Utilisation

#### a. Démontage des roues arrière

Appuyez sur le bouton au centre de la roue et tirez-la vers vous. Pour la remettre en place, appuyez sur le bouton, insérez l'axe dans l'essieu, poussez la roue à fond contre l'essieu et relâchez le bouton. Tirez sur la roue pour vérifier que l'axe s'est bien verrouillé automatiquement.

#### b. Pliage du dossier

Saisissez le câble situé à l'arrière de l'assise. Tirez-le en arrière pour déverrouiller le dossier. Pour le S2 Ultra Light et le S2 X, enlevez les protège-vêtements pour déverrouiller le dossier.

#### c. Tension des toiles

La tension des toiles d'assise et de dossier est réglable. L'accès se fait sous le fauteuil pour la toile d'assise et en levant l'arrière de la toile de dossier pour le dossier.

#### d. Hauteur du ou des repose-pied(s)

La hauteur se règle de chaque côté par une vis située à mi-hauteur de l'avant du châssis. Utilisez une clé BTR à 6 pans de 3mm pour faire le réglage. Attention : utilisez une clé de bonne qualité (grande marque – Facom, Wiha, Stanley, Würth, etc.) pour ne pas endommager les vis et ne serrez pas trop.

#### e. Angle du dossier

L'angle du dossier est réglable à volonté. Il y a 2 systèmes de réglage situés en bas des montants de dossier. Il est impératif de les régler en même temps et de la même façon.

Chaque système est composé d'une vis et d'un écrou.

Pour faire le réglage :

- desserrez à fond les 2 écrous
- vissez à fond la vis de gauche
- déterminez votre réglage avec la vis de droite et bloquez son écrou
- dévissez la vis de gauche jusqu'à venir en contact avec le châssis et bloquez son écrou

#### f. Essieu

La position de l'essieu est réglable à volonté d'avant en arrière (sauf S2 Ultra Light et S2 X).

Pour faire le réglage :

- desserrez légèrement les 2 écrous de blocage
- déplacez l'essieu et mesurez l'écart entre l'essieu et l'arrière du châssis des 2 côtés
- resserrez les écrous

Attention : la position de l'essieu doit être très exactement la même de chaque côté du châssis. Utilisez des clés de bonne qualité (grande marque) pour ne pas endommager les vis.

#### g. Freins

La position des freins est réglable à volonté d'avant en arrière (sauf S2 X).

Pour faire le réglage, utilisez une clé à 6 pans de 4mm. Un frein bien réglé doit s'enfoncer de 4mm à l'intérieur du pneu. N'utilisez pas un fauteuil roulant aux freins mal réglés et/ou aux pneus mal gonflés.

**Attention : les freins sont un dispositif de blocage à l'arrêt (type frein à main de voiture). Ils ne sont pas destinés à freiner dans les descentes.** Le freinage en descente doit se faire par les mains courantes.

Utilisez éventuellement des mitaines en cuir pour vous protéger les mains.

#### h. Anti-bascules

Les personnes ne maîtrisant pas l'équilibre sur les roues arrière seulement doivent impérativement utiliser au moins un anti-basculé pour se protéger des chutes vers l'arrière. Les anti-basculés sont escamotables : poussez-les vers le bas pour les faire pivoter d'avant en arrière. Vérifiez que les anti-basculés dépassent largement des roues arrière. Réglez-les si nécessaire grâce au bouton-poussoir de réglage.

### 4. Entretien

Un entretien soigné de votre fauteuil roulant PANTHERA augmentera sa durée de vie et maintiendra toutes ses qualités au quotidien. Vérifiez régulièrement le gonflage des pneus et le serrage des vis. Nettoyez régulièrement votre fauteuil roulant PANTHERA avec du savon ordinaire et mettez quelques gouttes d'un lubrifiant universel (type WD-40) sur toutes les parties mobiles.

Si vous allez à proximité de la mer, rincez abondamment votre fauteuil roulant PANTHERA après chaque sortie pour prévenir l'oxydation. Utilisez fréquemment un lubrifiant universel (type WD-40) sur toutes les parties mobiles. Si vous défaites des visseries, mettez de la résine anti-desserrage avant de les réinstaller.

### 5. Garantie

Les fauteuils roulants PANTHERA sont garantis 2 (deux) ans à partir de la date figurant sur le bon de livraison PANTHERA. Les châssis des fauteuils roulants PANTHERA sont garantis 7 (sept) ans.

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l'usure normale de votre fauteuil roulant PANTHERA (par exemple usure des pneus ou des bandages).

### 6. Certification de conformité

La société PANTHERA PRODUCTION AB certifie que ses fauteuils roulants sont conformes à la norme CE 93/42/EEG.

### 7. Destruction et recyclage

Les fauteuils roulants PANTHERA hors d'usage doivent être sortis les jours de collecte d'encombrants ou jetés en déchetterie dans la benne « métaux ». Ne les jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 9 rue Raoul Dautry<br>91190 GIF-SUR-YVETTE | Tel : 01.69.07.61.13<br>Fax : 01.64.46.25.48 | 9 rue Raoul Dautry<br>91190 GIF-SUR-YVETTE | Tel : 01.69.07.61.13<br>Fax : 01.64.46.25.48 |
| TVA Intra. FR 87505076794                  | SIRET 50507679400013                         | TVA Intra. FR 87505076794                  | SIRET 50507679400013                         |
| APE 3250A                                  |  | APE 3250A                                  |  |



## Bon de garantie de votre fauteuil roulant PANTHERA

N° de série du fauteuil roulant :

Cachet du revendeur :

Date du bon de livraison PANTHERA :

Date limite de validité de la garantie :

Les fauteuils roulants PANTHERA sont garantis 2 (deux) ans à partir de la date figurant sur le bon de livraison PANTHERA. Les châssis des fauteuils roulants PANTHERA sont garantis 7 (sept) ans.

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l'usure normale de votre fauteuil roulant PANTHERA (par exemple usure des pneus ou des bandages).

Les pièces échangées au titre de la garantie sont elles-mêmes garanties 6 mois après leur livraison ou jusqu'à la date limite de la garantie d'origine, si celle-ci est à plus de 6 mois.



### Partie à retourner complétée à Orthinea :

Nom de l'utilisateur :

Coordonnées :

Courriel :

N° de série du fauteuil roulant PANTHERA :

: Cochez cette case si vous acceptez de recevoir des informations sur les nouveautés Orthinea

9 rue Raoul Dautry  
91190 GIF-SUR-YVETTE

Tél. : 01 69 07 61 13  
Fax : 01 64 46 25 48  
www.orthinea.com